

CLARIMAT SUPER



Diese ADEFO-SPEZIALCHEMIKALIEN sind auf die Zahnfilm-Entwicklungsmaschinen CLARIMAT SUPER SII[®], SIII[®] und Girardelli- X 20[®], - X 24[®] abgestimmt.

Alle für diese und ähnliche Tauch-Entwicklungsmaschinen geeigneten Zahnfilme werden entwickelt mit

- ▶ niedrigstem Grundschleier,
- ▶ maximaler Empfindlichkeitsausnutzung,
- ▶ der erforderlichen steilen Gradation,
- ▶ und werden einwandfrei ausfixiert.



Die Abfüllung der Chemikalien ist praxisgerecht und ermöglicht ein äußerst einfaches Ansetzen in der Maschine.

Es werden keine Messgefäße benötigt.

Konfektionierung:

Kombinationspackung für CLARIMAT SUPER (Art.-No. 00174) enthält:

für 2 x 4,5 Liter gebrauchsfertigen Entwickler,
für 2 x 4,5 Liter gebrauchsfertiges Fixier,
und für 2 x 0,75 Liter gebrauchsfertigen Entwickler-Regenerator

GEBRAUCHSANWEISUNG:



CLARIMAT SUPER

Art.-No.  00174

Diese ADEFO-SPEZIALCHEMIKALIEN sind auf die Zahnfilm-Entwicklungsmaschinen CLARIMAT SUPER SII[®], SIII[®] und Girardelli- X 20[®], - X 24[®] abgestimmt.

Ansatz der Chemikalien:

► SPEZIAL-ENTWICKLER-KONZENTRAT

1 Kanister Entwickler-Konzentrat wird in den Entwicklertank eingefüllt und der Tank mit Wasser bis auf 4,5 Liter Tankvolumen aufgefüllt! Bei doppeltem Tankvolumen werden beide Entwicklerflaschen benötigt! GUT UMRÜHREN!

REGENERIERUNG

Inhalt des Entwickler-Regenerators in die leere Entwicklerflasche geben. 2x Regeneratorflasche mit der gleichen Menge Wasser füllen, so dass 0,75 Liter Entwickler-Regenerator vorhanden sind. GUT SCHÜTTELN!

Der Regenerator dient zum Niveaueausgleich und zum Auffrischen des Entwicklers. Nach Zugabe von Regenerator den Entwickler GUT UMRÜHREN!

► SPEZIAL-FIXIER-KONZENTRAT

1 Flasche Fixier-Konzentrat wird in den Fixiertank eingefüllt und der Tank mit Wasser bis auf 4,5 Liter Tankvolumen aufgefüllt. Bei doppeltem Tankvolumen werden beide Fixierflaschen benötigt. GUT UMRÜHREN!

Die Regenerierung des Fixierbades entfällt, Niveaueausgleich erfolgt mit Wasser!

Nach ca. 2 Monaten sind die Chemikaliertanks zu entleeren und Neuansätze durchzuführen.

ALLGEMEINE HINWEISE:

- Eine homogene Vermischung aller Chemikalienbäder ist unbedingt erforderlich.
- Stets das Fixierbad zuerst ansetzen, damit eine Verunreinigung des Entwicklerbades vermieden wird.

Sicherheitsratschläge:

In der Fotografie verwendete Chemikalien und deren Lösungen können beim Kontakt mit der Haut Reizungen hervorrufen. Deshalb sollte bei Hautkontakt die betreffende Stelle sofort mit viel Wasser abgespült werden.

Gesundheitsschädlich beim Verschlucken. Reizt die Augen und die Haut. Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich. Bei Berührung mit den Augen gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.

Bei Ansatz und Umfüllen der Lösungen, sowie bei der Reinigung des Arbeitsplatzes empfiehlt sich die Verwendung von Gummihandschuhen und Schutzbrille.